

# 平面耳挂式三层一次性使用口罩

有效阻隔飞沫传播



# ─ - 规格 • ---

材质: 无纺布, 熔喷布 尺寸: 95\*175mm

颜色:浅蓝色 包装:1盒50 只, 1箱20盒







## ─ 特色描述 • ─

三层防护,有效阻挡飞沫传播

第一层: 纺粘无纺布


吸附体内呼出的热气,令皮肤干爽舒适

第二层:熔喷布

过滤空气中的非油性颗粒物

第三层: 纺粘无纺布

有效阻隔飞沫传播

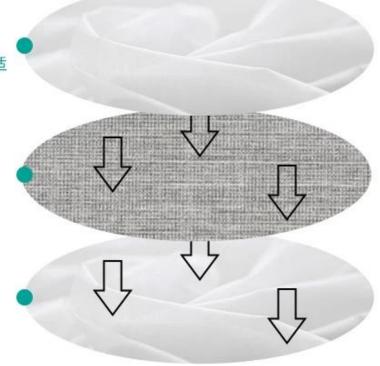


# 低阻力自由呼吸



# 3D设计,紧密贴合面部



### 检测报告

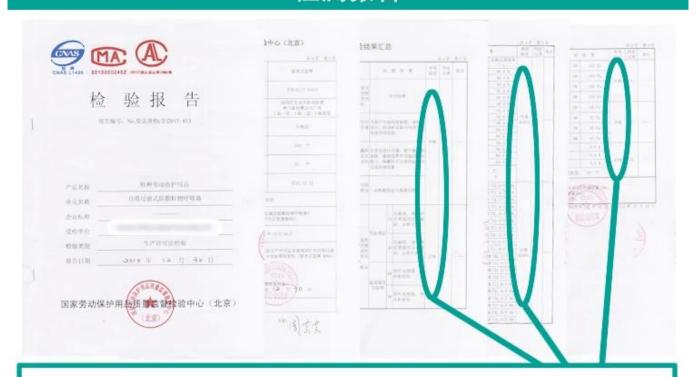

从材质到各功能上所有检测项目全部**合格** 

## ─ 佩戴操作方法

#### 步骤1:

打开口罩,将有鼻夹的朝上



#### 步骤2:

口罩紧贴面部和下巴, 把两个耳带分别戴在耳朵上



#### 步骤3:

将双手手指置于内金属棒的上方, 从中间向两侧按照鼻梁形状 向内按压,直到鼻梁被压成鼻梁 的形状



### Step4:


向下拉伸口罩,使口罩不留褶皱, 更好覆盖鼻子、嘴巴



# 一● 摘除操作方法 ●一


### 步骤1:

用手慢慢拉开耳带, 不要触碰口罩污染面

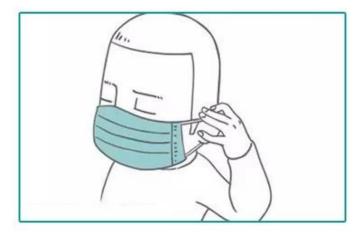

### 步骤2:

将口罩左右对折

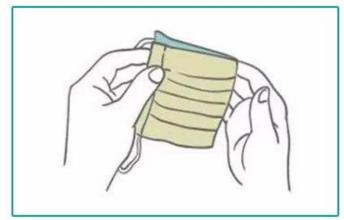

### 步骤3:

将口罩放入密封袋, 丢入垃圾箱



